


产品介绍 >>>

本品每套包含带帽拭子棉签和专用增菌培养基拭子管各一支，基于微生物选择性培养与生化代谢显色原理，在单一封闭试管内构建特定的生化微环境，通过多重选择机制和代谢指示系统，实现沙门氏菌 / 志贺氏菌的变色快检（肠道 SS 型）和霍乱弧菌的变色快检（肠道 VC 型），同时提供标本运送、富集、培养和初筛的一体化功能。

① 沙门氏/志贺氏菌的变色快检

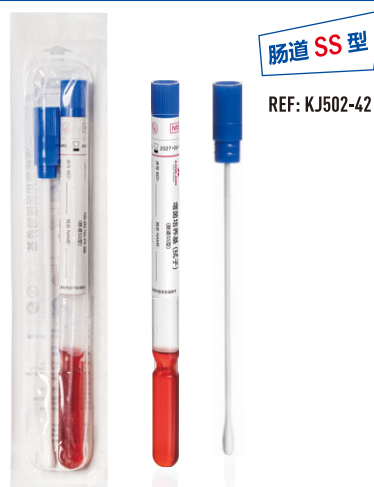

采样后培养



培养基变为黑色
(出现黑色菌落或沉淀)

疑似沙门氏菌阳性



培养基不变色
(维持原色)


疑似志贺氏菌阳性



变为黄色

阴性
(杂菌生长)

② 霍乱弧菌的变色快检

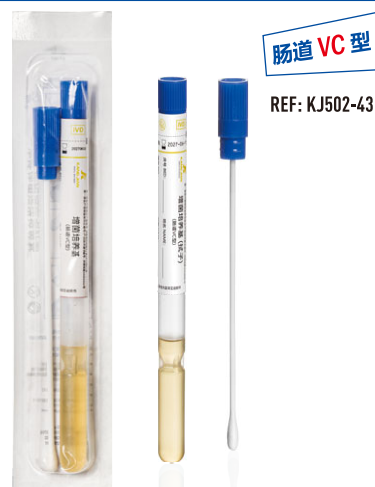

采样后培养



出现明显灰色至黑色
生长痕迹或生长环

疑似霍乱弧菌阳性



无明显变化

阴性

特点与优势 >>>

受检者可自主采样

适合基层及大规模筛查



全封闭检测设计

降低实验人员暴露风险




高达 97% 排除率


提升检测效率




使用图示 >>>

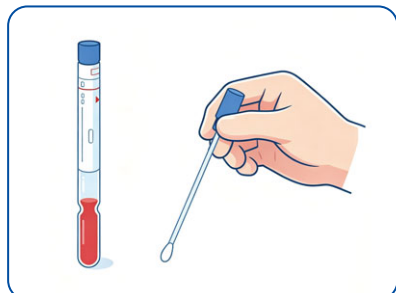

① 根据需要检测的致病菌类型选择对应产品。拆开产品包装，取出带帽的拭子棉签，采集足量样本。

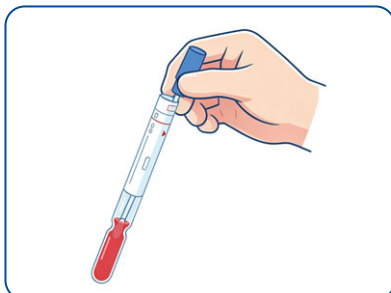

② 拧开并移除拭子管的管帽，将拭子棉头完全插入含有增菌培养基的拭子管内，并拧紧管帽。

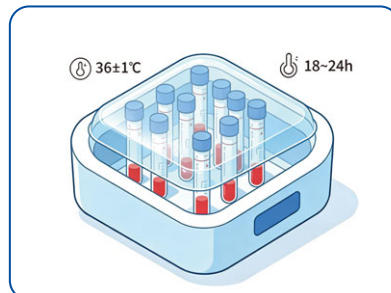

③ 将接种后的拭子管置于 36±1°C 的恒温箱中培养 18~24h，观察生长及培养基颜色变化情况，如颜色变化不明显，可延长培养时间至 48h。


使用场景 >>>



职业健康体检



临床肠道感染初筛

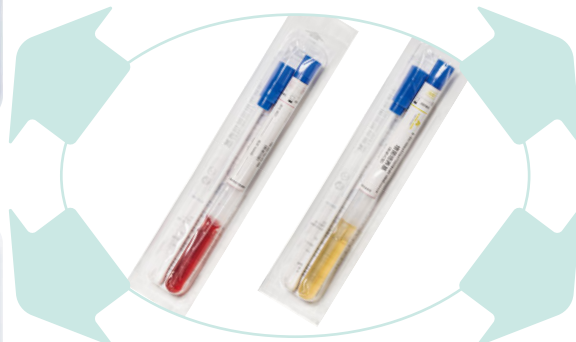

食品与环境检测



疾控常态化监测

订购信息 >>>

目录编号	型号	培养基颜色	包装规格	
KJ502-42	肠道 SS 型	透明红	50 套 / 袋 × 8 袋 / 箱	
KJ502-43	肠道 VC 型	透明淡黄	50 套 / 袋 × 8 袋 / 箱	

每套含带管帽的拭子棉签、专用增菌培养基拭子管各1支，单套纸塑包装。